



# VETH WILD

Insumos y equipamiento veterinario

Rut: 78.041.017-5

Contacto: +56978697659

## Circuito de anestesia para animales exóticos 50 ml

Circuito abierto para animales exóticos de menos de 500 gr de peso

### VENTAJAS

Disminuye el espacio muerto anatómico

Su correcto uso disminuye las posibilidades de generar barotrauma

Se puede esterilizar en autoclave



Para más información o dudas:

+56978697659

# Modo de Uso

Conector para traqueotubo, máscara de oxígeno o codo conector para capnógrafo



Entrada de conexión de manguera a gases medicinales (Ej: Oxígeno)

Entrada libre para el recambio de gases

- En caso de requerir para reanimación, abrir de forma manual. (en exhalación) o cerrar (en inhalación) .

## Para esterilizar:

1. Retirar la cinta de la base de la bolsa reservorio.



2. Separar ambas partes 1 y 2



3. Empacar para su esterilización en autoclave

